

## **Příbalová informace**

### **SkinMed StomaGel HY**

#### **Hydrogel s kyselinou hyaluronovou určený k ošetření dutiny ústní**

**30g, 50g**

**Charakteristika:** SkinMed StomaGel HY je veterinární přípravek ve formě gelu, který podporuje hojení v dutině ústní. Aplikace je bezbolestná, neštípe a nedráždí. Gel hydratuje ránu, snižuje mikrobiální zátěž ran, snižuje možnost vzniku sekundární infekce, vytváří vlhké prostředí, čímž napomáhá organismu rozvinout vlastní proces hojení. Pomáhá zastavit krvácení, zklidňuje defekt sliznice, snižuje bolest a otok. Kyselina hyaluronová urychluje proces hojení, eliminuje zjizvení.

Konzistence gelu je optimální pro aplikace ve všech polohách (nestéká), výborně přilne k místu rány. Zkracuje dobu hojení. Nealergizující, bezpečný i v případě požití.

**Přípravek je možné používat pro všechny cílové druhy zvířat, vyjma ryb a obojživelníků.**

**Použití:** SkinMed StomaGel HY je určen pro ošetření dutiny ústní a zubů při poranění, chirurgických zákrocích (poškozené dásně, extrakce zubů, ošetření oronazálních píštělí atd. ), po odstranění zubního kamene, popáleninách a většině akutních i chronických zánětů.

**Složení:** SkinMed Super roztok (94,96 %), Hyaluronát sodný (1,44%), Hydroxyetylcelulóza, Konzervant, Tetraboritan sodný

#### **Pokyny pro první pomoc:**

Při styku s kůží: není dráždivý, pouze u jedinců velmi citlivých na chlor se může objevit slabé podráždění, které po krátkém čase vymizí.

Při zasažení očí: není dráždivý, u velmi citlivých jedinců při podráždění vymývat oči tekoucí vodou.

Při požití: v případě požití množství menšího než 1dcl přípravku nejsou potřebná žádná opatření. V případě požití většího množství nechat zvíře vypít (lze-li to) větší množství vody a vyhledat pomoc veterinárního lékaře.

#### **Návod na použití:**

Očistěte ránu od mechanických nečistot. Vypláchněte ránu pro lepší efekt hojení oplachovým roztokem SkinMed Super. Následně aplikujte gel přímo na defekt, tak aby kopíroval jeho okraje rány v dostatečné vrstvě. Aplikujte 3-4 x denně dokud se rána nezahojí. V případě potřeby je možná kombinace s dalšími přípravky stanovenými veterinárním lékařem včetně injekční aplikace antibiotik, nesteroidních antiflogistik a dalších preparátů. Nepoužívat současně s lokálními ATB (antibiotiky) v kolagenových nosičích. Může dojít ke snížení lokálních účinků ATB.

**Manipulace a skladování:**

Dlouhodobě skladujte v původních obalech mimo dosah dětí v chladnu a temnu, krátkodobě (při používání) možno skladovat maximálně do teploty 30°C. Malé množství přípravku je možné zneškodnit naředěním vodou a spláchnutím do odpadové kanalizace. Přípravek je čirý gel. Prázdné obaly po vypláchnutí vodou mohou být odstraňovány společně s komunálním odpadem.

**Upozornění :**

Nepoužívat při alergii na některou ze substancí.

**Doba použitelnosti:** 18 měsíců

**Skladovat v rozmezí teplot 5°C - 30°C**

**Výrobce:**

NewWaterMeaning s.r.o.

Pobřežní 249/46, Praha 186 00

Česká republika

[www.nwm-med.com](http://www.nwm-med.com)

**Distributor a držitel rozhodnutí o schválení:**

Cymedica spol. s r.o.

Pod Nádražím 308, Hořovice 268 01,

Česká republika

[www.cymedica.com](http://www.cymedica.com)

**Číslo schválení veterinárního přípravku 152-17/C**

**Poslední revize textu 9/2017**